

AMBIANO®

Verwarmende lendengordel

GT-LBH-02



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 / 44 666 44
💻 gt-support@teknihall.be
ART.-NR.: 2004184

GEBRUIKSAANWIJZING



2003020041846
P051031696

Inhoud

Algemeen	1	Gebruik	8
Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	1	De aansluiting van de besturingseenheid aan de band aansluiten	8
Legenda	1	Omdoen van de verwarmende lendengordel	8
Veiligheid	2	Aan-/uitschakelen en temperatuur instellen	8
Gebruik volgen de voorschriften	2	Tijdsduur instellen	9
Gevaar door elektriciteit	2	Na het gebruik	9
Gevaar voor schade aan de gezondheid	4	Schoonmaken en onderhoud	10
Gevaar voor ongevallen	4	Opbergen	10
Gevaar voor kinderen en een meer uitgebreide groep personen	5	Storing en storing verhelpen	11
Omvang van de levering/ Onderdelen product	6	Technische specificaties	11
Voor het eerste gebruik	7	Conformiteitsverklaring	12
Uitpakken	7	Afvoeren	12
		Verpakking afvoeren	12
		Weggoeien van oude apparaten	12

ALGEMEEN

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren

Belangrijke instructies. Bewaren voor later gebruik.

Om de optimale werking en prestaties van dit artikel op elk moment te garanderen en om uw persoonlijke veiligheid te waarborgen, hebben we een verzoek aan u:



lees voor het eerste gebruik van het apparaat deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem vooral de veiligheidsinstructies in acht!

Alle werkzaamheden aan en met dit artikel mogen alleen worden uitgevoerd voor zover ze beschreven zijn in de gebruiksaanwijzing.

Wanneer u deze gebruiksaanwijzing niet volgt, kan dit ernstige letsels of schade aan dit artikel tot gevolg hebben.

Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij. Deze originele gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage www.gt-support.de worden gedownload.

Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.



WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, indien het niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.



VOORZICHTIG! Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

OPMERKING!

Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige bijkomende informatie over de installatie of over de bediening.



Beschermingsklasse II: versterkte of dubbele isolatie tussen actieve en aanraakbare delen. Meestal is er geen verbinding met de randaarde.



Instructies lezen



Wassen op max. 30 °C in het programma voor de fijne was



Niet wassen (bedieningsgedeelte)



Niet bleken



Niet in de droogtrommel drogen



Niet strijken



Niet chemisch reinigen



Geen naalden insteken



Niet samengevouwen of samengeduwd gebruiken



Niet voor gebruik door zeer jonge kinderen (0 - 3 jaar) geschikt



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk 'Conformiteitsverklaring'): met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Het zegel "Veiligheid gekeurd" (GS-tekens) bevestigt dat het artikel voldoet aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet.



Op schadelijke stoffen getest artikel

Veiligheid

Gebruik volgens de voorschriften

- Dit artikel is ontworpen voor huishoudelijk gebruik zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- De verwarmende lendengordel mag niet als onderlegger worden gebruikt.
- Het is niet geschikt voor medisch gebruik in ziekenhuizen, praktijken, enz.
- Het artikel is geen medisch hulpmiddel en is niet geschikt voor therapeutische doeleinden.

- Baby's, kleine kinderen, hulpeloze of personen die niet gevoelig zijn voor warmte en dieren mogen niet worden verwarmd met de verwarmende lendengordel.
- Dit artikel mag alleen worden gebruikt in droge ruimten binnenshuis.

Gevaar door elektriciteit



Het bedieningsgedeelte en de stekkers mogen niet worden blootgesteld aan druipend of spattend water. Nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen. Als er vloeistof is binnengedrongen, bestaat er gevaar voor elektrische schokken.

Gebruik de warmteband na het wassen pas als hij helemaal droog is.

- Reinig de verwarmende lendengordel bij normale en zware vervuiling op maximaal 30 °C (in het programma fijne was en met het laagste aantal omwentelingen bij het centrifugeren).
- Sluit de verwarmende lendengordel aan op een goed geïnstalleerd stopcontact waarvan de spanning overeenkomt met de "Technische specificaties".

- Gebruik alleen het bijgeleverde bedieningsgedeelte om de verwarmende lendengordel te bedienen (GT-LBH-02).
 - Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is zodat u indien nodig snel de stekker uit het stopcontact kunt trekken.
 - Gebruik de verwarmende lendengordel niet:
 - als de verwarmende lendengordel, het netsnoer, de verwarmende lendengordel of de stekker beschadigd zijn,
 - als de verwarmende lendengordel vochtig is.
 - Wikkel het netsnoer voor het aansluiten helemaal af. Let er daarbij op dat het netsnoer niet door scherpe randen of hete voorwerpen wordt beschadigd.
 - Zorg ervoor dat u niet struikelt over het netsnoer.
 - Als het netsnoer van de verwarmende lendengordel beschadigd is, dient het om gevaren te voorkomen te worden vervangen door de fabrikant, zijn klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerd persoon.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - als u de verwarmingsfunctie niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voordat u de verwarmende lendengordel schoonmaakt of opbergt,
 - als er tijdens het gebruik een duidelijke storing optreedt,
 - tijdens een onweersbui.
Trek dan altijd aan de stekker, niet aan de voedingskabel.
 - Wijzig niets aan de verwarmende lendengordel of aan de aansluitkabel. Laat reparaties alleen door een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren. Niet vakkundig gerepareerde apparaten brengen de gebruiker in gevaar. Houd u ook aan de bijgevoegde garantievoorwaarden.
 - Gebruik voor het aansluiten van de verwarmende lendengordel uitsluitend de bijgeleverde regeleenheid type GT-LBH-02.
 - Gebruik alleen de origineel meegeleverde kabel om het verwarmende lendengordel aan te sluiten.
 - Volg de instructies voor de opslag van het apparaat zoals beschreven in het hoofdstuk "Opslag".

Gevaar voor schade aan de gezondheid

⚠ VOORZICHTIG! Langdurig gebruik op de hoogste stand kan leiden tot huidirritatie.

- Kies bij langer gebruik (90 minuten, daarna schakelt de verwarmende lendengordel automatisch uit) een lage verwarmingsstand (stand 1). Deze instelling wordt bijvoorbeeld aanbevolen als u zich moe voelt en tijdens het gebruik in slaap zou kunnen vallen.
- Als u de warmte van de verwarmende lendengordel onangenaam of pijnlijk vindt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het rugverwarmingskussen. Raadpleeg een arts voordat u het weer gebruikt.
- De verwarmende lendengordel mag niet worden gebruikt door personen of personen die bescherming behoeven, die ongevoelig zijn voor warmte of die niet op oververhitting kunnen reageren.

Gevaar voor ongevallen

- De kabel en de besturingseenheid van het apparaat kunnen leiden tot verwarrings-, verwurgings-, struikelgevaar of gevaar voor betreden als ze


niet goed zijn aangebracht. De gebruiker moet ervoor zorgen dat overtollige stroomkabels veilig worden geplaatst.

- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren. Er is een verhoogd risico op struikelen door rondslingerende kabels.
- Schakel de verwarmende lendengordel niet in als dit gevouwen of samenge-drukt is.
- Gebruik de verwarmende lendengordel niet als warme onderlegger door erop te gaan zitten of het bijv. onder een beddenlaken te leggen.
- De verwarmende lendengordel mag niet ingeklemd, scherp geknikt of in een vochtige toestand worden ingeschakeld.
- Leg tijdens het gebruik geen grote of zware voorwerpen zoals koffers, wollen dekens of plaids en tassen op de verwarmende lendengordel.
- De verwarmende lendengordel is onderhevig aan een normale veroudering. Controleer daarom voor elk gebruik of de verwarmende lendengordel, de regeleenheid en het netsnoer tekenen van slijtage of beschadiging vertonen.

Als dergelijke signalen aanwezig zijn of als de verwarmende lendengordel niet correct is gebruikt, moet dit door een gespecialiseerde werkplaats worden gecontroleerd voordat u de band weer in gebruik neemt.


- Steek geen naalden of andere spitse voorwerpen in de verwarmende lendengordel.
- Bewaar de verwarmende lendengordel altijd op een droge plaats. Bescherm de band tegen warmtebronnen.
- De verwarmende lendengordel mag niet chemisch worden gereinigd, gemangeld, uitgewrongen of gestreken. Volg de instructies voor reiniging en onderhoud.
- De verwarmende lendengordel mag niet nat worden gebruikt.

Gevaar voor kinderen en een meer uitgebreide groep personen

 **WAARSCHUWING!** Houd verpakkingzakken en beschermfolies uit de buurt van baby's en peuters, er bestaat verstikkingsgevaar! Let er ook op dat de zak van de verpakking niet over het hoofd wordt getrokken.

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het product op een veilige manier en zij de gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen mogen niet met dit artikel spelen. Laat kinderen of personen die hulp nodig hebben niet zonder toezicht elektrische apparaten gebruiken.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.
- Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 3 jaar en tot jonger dan 8 onder toezicht en met een besturing die altijd is ingesteld op de minimumtemperatuur.
- Kinderen jonger dan drie jaar mogen de verwarmende lendengordel niet gebruiken omdat ze niet in staat zijn om te reageren op een eventuele oververhitting.

OMVANG VAN DE LEVERING/ONDERDELEN PRODUCT

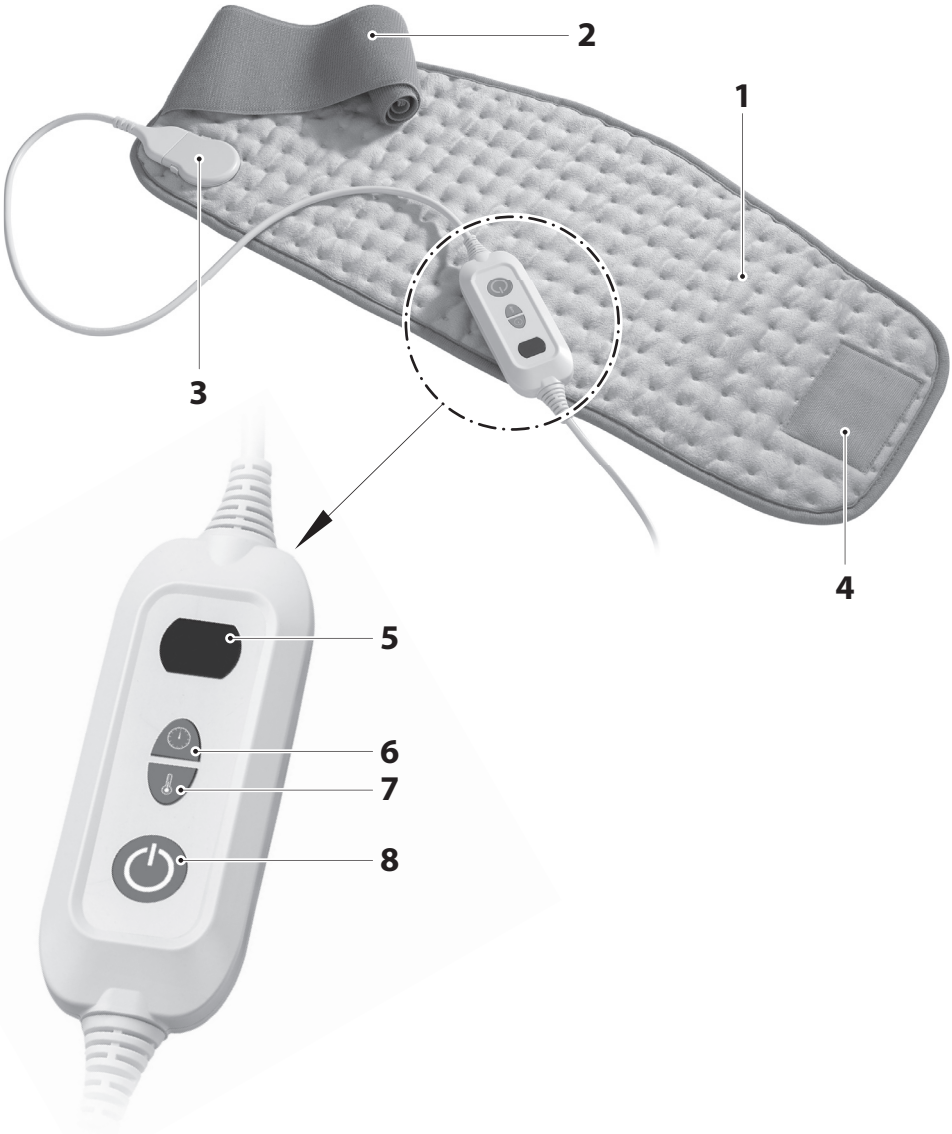

OMVANG VAN DE LEVERING/ ONDERDELEN PRODUCT

- 1 Warmtekussen voor de rug en de buik (buiten)
- 2 Elastische buikgordel
- 3 Aansluitstekker voor stopcontact van besturingseenheid (vormstekker kan alleen uitgelijnd worden ingestoken)
- 4 Klittenbandsluiting voor de buikgordel
- 5 Display
- 6 Toets om de tijdsduur in te stellen
- 7 Toets om de verwarmingsstand in te stellen
- 8 Toets **AAN/UIT** (⏻)
 - Originele gebruiksaanwijzing
 - Garantiebewijs

Voor het eerste gebruik

Uitpakken

OPMERKING! Gevaar voor schade!

Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of andere scherpe voorwerpen, kan het artikel beschadigd raken.

1. Neem het artikel en de accessoires uit de verpakking. Controleer of het artikel volledig is.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig en wikkel het netsnoer helemaal af.
Controleer of de afzonderlijke delen beschadigingen vertonen. Als dit het geval is, gebruik ze dan niet. Wend u daarvoor tot het serviceadres dat op de garantiekaart staat aangegeven.
3. Controleer of de levering volledig is. Controleer of de afzonderlijke delen beschadigingen vertonen. Als dit het geval is, gebruik het item dan niet. Wend u daarvoor tot het serviceadres dat op de garantiekaart staat aangegeven.
4. Controleer voor u het apparaat de eerste keer gebruikt of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw huishouden.
5. Reinig het bedieningsonderdeel voor het eerste gebruik met een licht bevochtigde doek om mogelijke verpakkings- en productieresten te verwijderen.



Verwijder eventueel de beschermfolie van het display van het bedieningsgedeelte.


Gebruik

De aansluiting van de besturingseenheid aan de band aansluiten

OPMERKING! Gevaar voor schade!

Houd de band niet vast bij het loskoppelen of aansluiten van de stopcontact.

Om los te koppelen of aan te sluiten houdt u de aansluitstekker vast (zie illustratie).

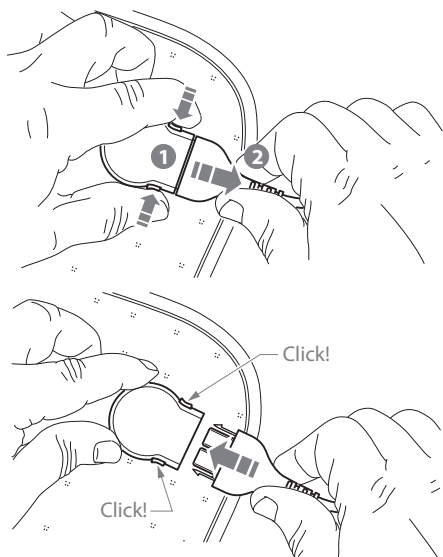

i Om aan te sluiten kan het nodig zijn de stopcontact te draaien (de vormstekker kan alleen uitgelijnd worden ingestoken).

Omdoen van de verwarmende lendengordel

1. Leg de verwarmende lendengordel om uw rug. Zorg ervoor dat de aansluitstekker met de reeds aangesloten stopcontact van de besturingseenheid zich aan de buitenkant (weg van het lichaam) aan de linkerkant bevindt (klittenbandsluiting weg van het lichaam).

i Zorg ervoor dat er geen andere stoffen aan de klittenbandzijde raken, anders kunnen ze beschadigd worden..

De klittenbandsluiting na gebruik van de riem altijd sluiten.


2. Leg nu de band aan de rechterkant van uw lichaam en maak de band vervolgens vast met de elastische buikgordel en de klittenbandsluiting.

i U kunt de pasvorm naar wens aanpassen met de elastische tailleband.

Aan-/uitschakelen en temperatuur instellen

i Als de stekker in het stopcontact wordt gestoken voordat het bedieningsgedeelte op de band is aangesloten, verschijnt er een knipperende **F** (fout) op het display. Haal in dat geval eerst de netstekker uit het stopcontact en sluit de stopcontact van de besturingseenheid aan op de band.

1. Steek de netstekker in op een naar behoren geïnstalleerd stopcontact dat overeenkomt met de "Technische specificaties".


2. Druk op de knop  om de verwarmende lendengordel in te schakelen.

3. Druk herhaaldelijk op de toets  totdat de gewenste verwarmingsstand op het display wordt weergegeven:

1 - 3 lage warmte


4 - 6 matige warmte

7 - 9 hoge warmte


 Als achter het ingestelde warmteniveau op het display een punt oplicht, is de verwarmende lendengordel aan het opwarmen. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, dooft het punt. Dit proces kan tijdens het gebruik verschillende malen worden herhaald.


Dek het bedieningsgedeelte tijdens het gebruik niet af of bedek het ook niet. Leg het naast u.

4. Om de verwarmingsfunctie te beëindigen, drukt u nogmaals op de toets . Het scherm dooft.


 Om de verwarmende lendengordel snel op te warmen, dient u verwarmingsstand 9 te kiezen.


Als u de verwarmende lendengordel gedurende langere tijd wilt gebruiken, raden wij u aan om verwarmingsstand 1 in te stellen.

Tijdens het gebruik kunt u op elk moment een hogere of lagere verwarmingsstand instellen door op de knop  te drukken.

De verwarmende lendengordel schakelt uit als de toets  per ongeluk ca. 30 seconden ingedrukt wordt gehouden terwijl deze uitgeschakeld is. Dit voorkomt oververhitting als u bijv. per ongeluk op het bedieningsgedeelte gaat zitten.

Tijdsduur instellen

 U kunt een tijdsduur instellen waarna de verwarmende lendengordel zich automatisch uitschakelt.

1. Stel de gewenste verwarmingsstand in.
2. Stel de gewenste tijdsduur in door herhaaldelijk op de toets  te drukken:

Stand 1 = 10 minuten


Stand 2 = 20 minuten


...

...

Stand 9 = 90 minuten

Na het gebruik

1. Druk op de knop  om de verwarmende lendengordel uit te schakelen.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Trek de stopcontact van de besturingseenheid uit de verwarmende lendengordel.

 Hierdoor wordt voorkomen dat per ongeluk aan de aansluitbus van de band wordt getrokken of dat de aansluitstekker scheurt - Gevaar voor schade!

Schoonmaken en onderhoud



Haal de stekker uit het stopcontact en haal de stopcontact van de besturingseenheid van de band voordat u de verwarmende lendengordel schoonmaakt.

Het bedieningsgedeelte mag niet in water worden ondergedompeld.

1. Veeg indien nodig het bedieningsgedeelte schoon met een licht bevochtigde zachte doek.
2. Verwijder indien nodig kleinere vlekken van de verwarmende lendengordel met een licht bevochtigde doek.
3. Reinig de verwarmende lendengordel bij normale en zware vervuiling op maximaal 30 °C (in het programma fijne was en met het laagste aantal omwentelingen bij het centrifugereren).



Volg de onderhoudssymbolen op het etiket van de verwarmende lendengordel.

Het rugverwarmingskussen door het wassen in de wasmachine zwaar belast. Het rugverwarmingskussen mag in de loop van de tijd niet vaker dan vijfmaal in totaal worden gewassen.

Sluit de klittenbandsluiting vóór het wassen zodat er geen pluisjes in het klittenband terechtkomen.

Was het rugverwarmingskussen niet samen met ander textiel dat voorzien is van metalen knopen, klinknagels of ritssluitingen. Het rugverwarmingskussen kan beschadigd worden.

OPMERKING! Gevaar voor schade!

De verwarmende lendengordel niet uitwringen! Gebruik geen wasknijpers of iets dergelijks en hang de band niet op.

4. Spreid de band uit (bijv. op een handdoek) en laat hem na het wassen volledig aan de lucht drogen.



Gebruik de verwarmingsfunctie niet om de verwarmende lendengordel te drogen.

5. Gebruik de verwarmende lendengordel pas weer als hij helemaal droog is.

Opbergen

OPMERKING! Gevaar voor schade!

De verwarmende lendengordel niet samenvouwen! Dit zou het verwarmingsdraden kunnen beschadigen.

Laat de verwarmende lendengordel volledig afkoelen voordat u de band oprolt en opbergt.


Bewaar de band op een schone en droge plaats waar hij beschermd is tegen andere warmtebronnen bijvoorbeeld een verwarmingselement.

Bewaar geen zware voorwerpen bovenop de opgerolde verwarmende lendengordel en buig deze niet.

Storing en storing verhelpen

Storing	Mogelijke oorzaak en remedie
Werkt niet.	<ul style="list-style-type: none">- Stekker in het stopcontact? Stekker aan een onder spanning staand stopcontact aansluiten.- De stopcontact van de besturingseenheid is niet correct verbonden met de aansluitstekker van het verwarmingskussen. Stopcontact van de besturingseenheid volledig in de aansluitstekker drukken.
Bediening niet mogelijk.	<ul style="list-style-type: none">- Knipperende F op het display Verkeerde aansluitvolgorde. Eerst de stopcontact van de besturingseenheid op de aansluitstekker van de verwarmende lendengordel aansluiten, vervolgens de netstekker op de stroomvoorziening aansluiten.- Er is een technische fout opgetreden. Trek de netstekker uit het stopcontact en laat de verwarmende lendengordel volledig afkoelen. Na het afkoelen kunt u het verwarmingskussen weer normaal gebruiken. Als dit niet mogelijk is, is de verwarmende lendengordel vanwege de elektrische veiligheid uitgeschakeld en kan het niet meer worden gebruikt.
Verwarmingskussen/display wordt uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">- Geen fout. U kunt een tijdsduur instellen waarna de warmtefunctie automatisch uitschakelt. Zie tijdsduur instellen.

Technische specificaties

Revisienummer:	2023_01
Stroomvoorziening:	230 V~, 50 Hz
Vermogen:	100 W
Beschermingsklasse:	II/ 
Verwarmingsstanden:	9
Uitschakelniveaus (timerniveaus):	9 (10, 20, ... of 90 minuten)
Materiaal:	100 % polyester

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

Conformiteitsverklaring

CE De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd.

De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op www.gt-support.de

AFVOER

Verpakking verwijderen



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud paper en breng folies naar de inzameling van recycleerbare materialen.

Weggoien van oud apparaat



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval in te leveren. Dit garandeert dat de recycling op een milieuvriendelijke en grondstofbesparende manier wordt uitgevoerd.

Eigenaars van elektrische en elektronische apparaten van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette inzamelpunten. Het inleveren van oude apparaten is gratis.

In het algemeen zijn de distributeurs verplicht ervoor te zorgen dat oude apparaten kosteloos worden teruggenomen door geschikte terugnamefaciliteiten binnen een redelijke afstand ter beschikking te stellen.

Consumenten hebben de mogelijkheid een oud apparaat gratis terug te brengen naar een distributeur die verplicht is het terug te nemen indien u een gelijkwaardig nieuw apparaat met in wezen dezelfde functie koopt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden.

KLANTENSERVICE

 0900 / 44 666 44

 gt-support@teknihall.be

ART.-NR.: 2004184

Globaltronics Service Center

c/o teknihall Benelux bvba

Brusselstraat 33

2321 Meer

BELGIË

Verkocht door (Geen serviceadres):

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland